

Embout Surdifuse « OPEN »

Cet embout a été conçu pour répondre à de nombreuses demandes portant sur une meilleure tenue des embouts pour les appareils très performants de type « OPEN ».

Deux types de montage du tube sont prévus pour cet embout :

(si vous n'avez pas envoyé votre modèle de tube avec l'empreinte...)

1. le plus fréquent consiste à couper la partie terminale du tube (connecteur destiné à recevoir la corolle initiale), puis à insérer sur quelques millimètres le tube fin (1,4 mm en général) dans le conduit prévu à cet effet dans la partie supérieure. Un peu de colle Cyanolite fixe alors le tube correctement.

Astuce : mettez en place dans le tube l'écouvillon de nettoyage avant le collage et retirez le ensuite. Vous serez ainsi certain de ne pas avoir obstrué le tube avec la colle.

2. l'autre montage consiste à insérer directement ce connecteur dans l'embout. Il suffit pour cela d'agrandir le perçage avec le forêt adapté, au diamètre de ce connecteur (variable suivant les fabricants). Pensez à couper le brin d'appui, devenu inutile. Ce montage peut être nécessaire en cas de besoin de longueur supplémentaire du tube pour un bon placement dans le conduit.

