



-Mode d'emploi -

Bague de rétention pour Silicone (ref 136)

1. placer la bague sur le tube un peu avant le coude, ailettes coté conduit
2. coller la bague sur le tube par 1 point de colle Cyanolit verte (ref 110)
3. tirer l'ensemble à travers l'embout en silicone, de l'extérieur vers l'intérieur
4. couper le tube coté conduit, tout en maintenant une traction. le tube est fermement tenu dans l'embout. Seule une forte traction peut permettre de l'extraire en cas de besoin (pour changer de tube par exemple)

Surdifuse S.A.S. - Siège : 19 rue des Petites Ecuries BP 28 - 75462 PARIS cedex 10
Fabrication d'embouts et protections - Fournitures pour prothèses auditives
Tél : 01 47 70 97 11 - Fax : 01 42 46 84 72