

Pour réaliser les meilleures empreintes, gage d'embouts et protections ou obturateurs bien adaptés, les étapes à suivre sont :

1. Contrôler le conduit jusqu'au tympan avec l'otoscope. Rechercher les éventuelles cavités, déformations, perforations et autres contre indications à la prise d'empreinte.




2. Placer le protège tympan au fond du conduit, en exerçant une légère traction sur le pavillon. Il faut le placer de façon à éviter toute fuite latérale de la pâte qui pourrait lors de l'injection venir au contact du tympan.

A noter : pour un embout à connecter sur une aide auditive, pensez à positionner sur l'oreille le contour qui sera utilisé (ou une forme similaire), et le cas échéant, les branches de lunettes du patient. Le but est de placer le pavillon exactement à la place qu'il occupera une fois l'appareillage installé. L'empreinte sera ainsi plus fidèle aux conditions réelles d'utilisation.



3. Injecter la pâte à empreinte en commençant par le fond du conduit, puis remonter en sortant peu à peu la seringue jusque dans la conque, et pour finir dans l'hélix. N'hésitez pas à bien remplir le pavillon.

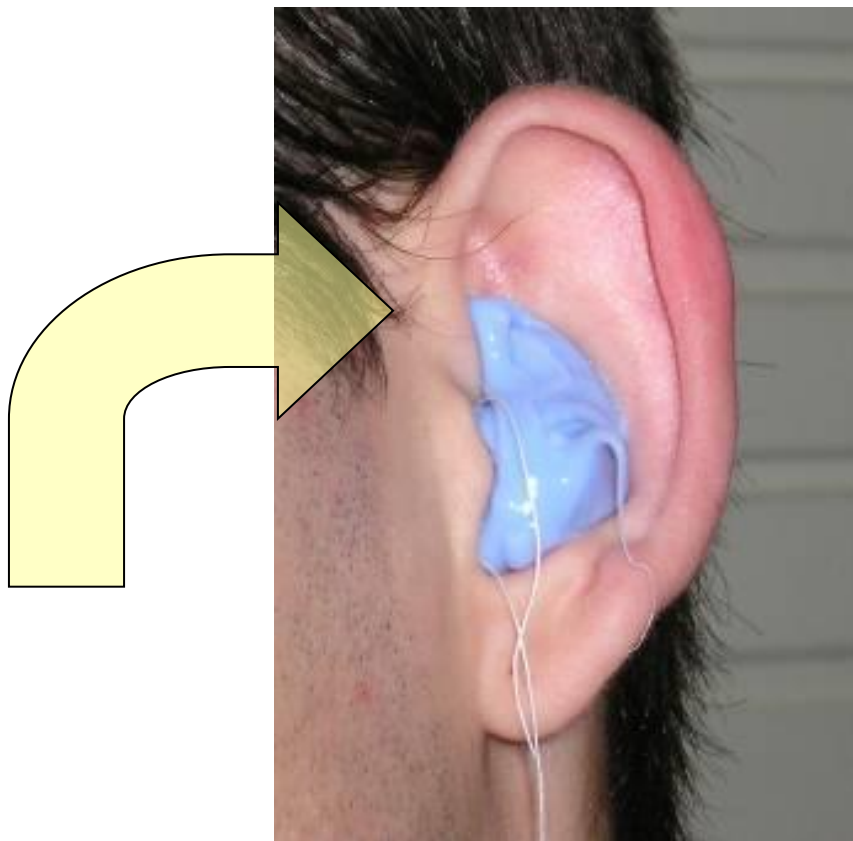

*Attention : finir de **remplir en haut du pavillon** pour bien compléter avec la pâte le pli et le retour en haut de l'hélix.*

- Placer une feuille de YETI sur la pâte. Egaliser ensuite avec le pouce en pressant doucement avec des mouvements circulaires. Ce qui permet d'obtenir un bon remplissage de la conque avec une épaisseur suffisante. Cette qualité d'empreinte est indispensable, en particulier pour la réalisation d'embouts « coquille », de « ear monitors », de protections auditives ou bien d'obturateurs...Grâce à la feuille YETI, aucune adhérence ou trace de pâte ne reste sur les doigts.



- Après la prise de la pâte, dégager doucement l'empreinte de l'oreille en commençant par le haut. L'empreinte, d'épaisseur suffisante, présente alors une face plate prête pour y inscrire la contremarque.





- √ Feuilles à Empreintes **YETI**– Boite de 500 feuilles (ref : 115)
- √ Protège-tympons Coniques – Sachet de 100 (ref : 105)
- √ Protège-tympons Ronds Taille Adulte - par 50 pcs (ref :282)
- √ Protège-tympons Ronds Taille Enfant - par 50 pcs (ref :281)

- √ Pâte à Empreinte **YETI** 50x50 - kit de 400g + 400 g (ref : 121)

- √ Pâte à Empreinte **YETI** 39sh Violet - cartouche Automix 1 (ref : 169)
- √ Pâte à Empreinte **YETI** 39sh Violet - cartouche Automix 2 (ref : 332)

- √ Pâte à Empreinte **YETI** 35sh Rose - cartouche Automix 1 (ref : 333)
- √ Pâte à Empreinte **YETI** 35sh Rose - cartouche Automix 2 (ref : 339)