


- Mode d'emploi -


**Embout Surdifuse « OPEN »**

Cet embout a été conçu pour répondre à de nombreuses demandes portant sur une meilleure tenue des embouts pour les appareils très performants de type « OPEN ».

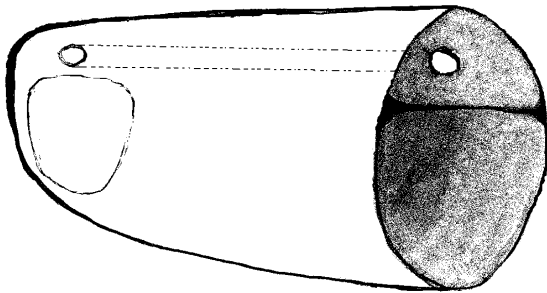


Deux types de montage du tube sont prévus pour cet embout :

*(si vous n'avez pas envoyé votre modèle de tube avec l'empreinte, ce qui est toujours préférable...)*

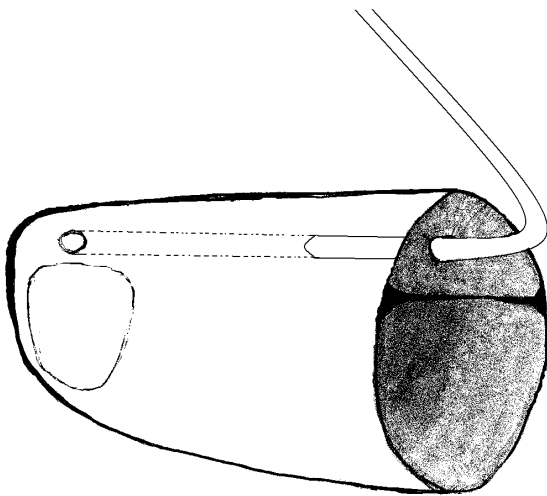

1. le plus fréquent consiste à couper la partie terminale du tube (connecteur destiné à recevoir la corolle initiale), puis à insérer sur quelques millimètres le tube fin (1,4 mm en général) dans le conduit prévu à cet effet dans la partie supérieure. Un peu de colle Cyanolit fixe alors le tube correctement.

*Astuce : mettez en place dans le tube l'écouvillon de nettoyage avant le collage et retirez le ensuite. Vous serez ainsi certain de ne pas avoir obstrué le tube avec la colle.*

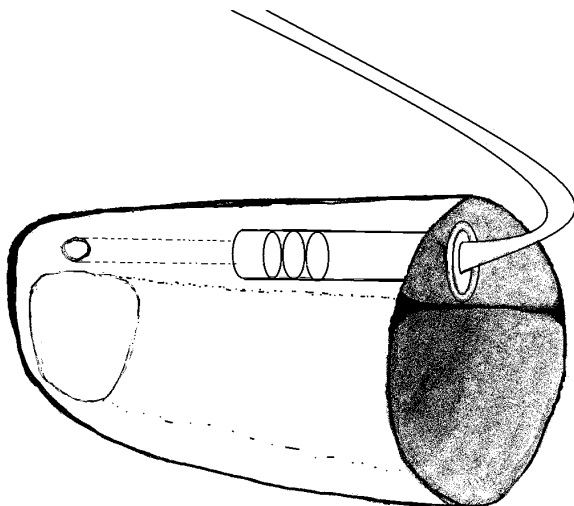

2. l'autre montage consiste à insérer directement ce connecteur dans l'embout. Il suffit pour cela d'agrandir le perçage avec le forêt adapté, au diamètre de ce connecteur (variable suivant les fabricants). Pensez à couper le brin d'appui, devenu inutile. Ce montage peut être nécessaire en cas de besoin de longueur supplémentaire du tube pour un bon placement dans le conduit.

---

**SURDIFUSE s.a.s. - Tél : 01 47 70 97 11 – [infos@surdifuse.com](mailto:infos@surdifuse.com)**

s.a.s. capital de 50.000 Euros - Siège : 19 rue des Petites Ecuries BP 28 - 75462 PARIS cedex 10

Fabrication d'Embouts et Protections Auditives - Fournitures pour prothèses auditives

RCS 325 080 471 00056 – APE 3250A - TVA intra FR30 325 080 471