



Mode d'emploi

Bague de rétention pour Embout en Silicone

(permet une fixation efficace des tubes dans les embouts en silicone)

*Ref : 136 pour tube **standard** 3 mm x 2 mm*

*Ref : 283 pour tube **épais** 3,3 mm x 2 mm*

1. placer la bague sur le tube un peu avant le coude, ailettes coté conduit (pour la Ref 283 le rebord reste sur l'embout)
2. coller la bague sur le tube par 1 point de colle Cyanolit verte (*ref 110*)
3. tirer l'ensemble à travers l'embout en silicone, de l'extérieur vers l'intérieur (sens de la flèche)
4. couper le tube coté conduit, tout en maintenant une traction. Le tube est fermement tenu dans l'embout. Seule une forte traction peut permettre de l'extraire en cas de besoin (pour changer de tube par exemple)

SURDIFUSE s.a.s. - Tél : 01 47 70 97 11 – infos@surdifuse.com

s.a.s. capital de 50.000 Euros - Siège : 19 rue des Petites Ecuries BP 28 - 75462 PARIS cedex 10

Fabrication d'Embouts et Protections Auditives - Fournitures pour prothèses auditives

RCS 325 080 471 00056 – APE 3250A - TVA intra FR30 325 080 471